



1. **Fjern** den blå **hætte** ved at holde forsigtigt på siderne. En opsamlingspude vil nu komme til syne. **Vær opmærksom på, at der er en blå linie i hvert testvindue.**

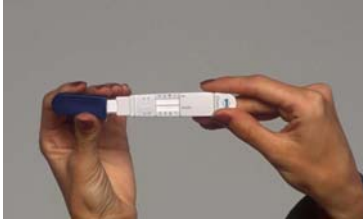

2. **Åben** munden og **gnid** forsigtigt opsamlingspuden mod indersiden af kinden i cirkulære bevægelser ca. 15-20 gange. **Hold hovedet stabilt.**

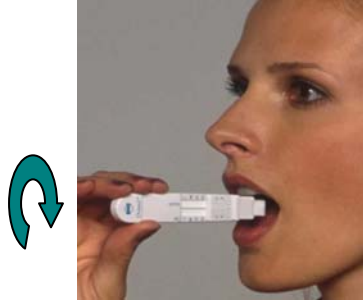


3. **Gnid** opsamlingspuden forsigtigt mod den modsatte kind i cirkulære bevægelser ca. 15-20 gange.



4. **Gnid** forsigtigt opsamlingspuden **oven på tungen** ca. 15-20 gange. **Bid, tyg, sug eller bøj ikke opsamlingspuden.**



6. Placer opsamlingspuden under tungen i ca. 30 sekunder for at opsamle spyt. Instruer donoren om at holde den på plads med sin hånd. Når der er **samlet nok spyt**, kan det **ses ud fra strømmen fra de 2 blå linier**. Gentag trin 2-6 indtil de blå linier flyder.

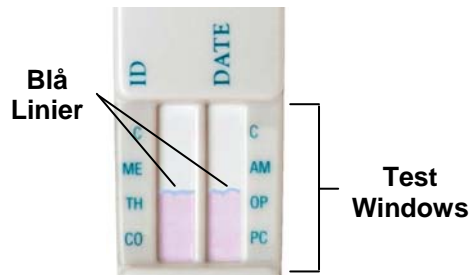

7. **Fjern** den fra munden så snart de blå linier begynder at flyde. **Sæt derefter hæften på.**



5. **Gnid** forsigtigt opsamlingspuden **under tungen** adskillige (ca. 15-20) gange.

8. Læg Oratect III på en plan flade, og **aflæs resultatet tidligst 5 minutter og senest 30 minutter efter testen.**

### Aflæsning af Oratect III Test Resultat

#### Ugyldigt Resultat

**Ingen streg** ud for **KONTROL(C)** området: **testen ugyldig**, selvom der er linier i testområdet. **Gentag** testen med en ny Oratect III.



Eksempel:

ME: Ugyldig  
TH: Ugyldig  
CO: Ugyldig  
AM: Ugyldig  
OP: Ugyldig  
PC: Ugyldig

#### Negativt Resultat

For hver test skal der fremkomme 2 linier:

- **En i KONTROL(C) området**
- **En i det specifikke TEST område**

Tydeligheden af stregerne kan variere, men hvis de er synlige eller blot kan skimtes, er det et **Negativt** resultat.



Eksempel:

ME: Negativ  
TH: Negativ  
CO: Negativ  
AM: Negativ  
OP: Negativ  
PC: Negativ

#### Antageligt Positivt Resultat

I **KONTROL(C)** området skal der være en farvet streg. Når der ikke fremkommer nogen streg i et specifikt testområde, er testen antageligt positiv for det pågældende stof.

**Bemærk:** stregerne må slet ikke kunne skimtes, hvis der skal være tale om et positivt resultat.



Eksempel:

ME: **Positiv**  
TH: Negativ  
CO: Negativ  
AM: Negativ  
OP: Negativ  
PC: Negativ

#### Ordforklaring:

**TH:** Hash, **ME:** Methamfetamin(Ecstasy), **CO:** Kokain, **AM:** Amfetamin, **OP:** Opiater(Heroin), **BZ:** Benzodiazepiner

**Detektionstider:** Op til 2 dage for **ME, CO, AM, OP** og **BZ**, Op til 4 timer for **TH**.