

1. **Åben** den forseglede pose og tag testlåget ud.



2. **Skr**u testlåget godt fast på den medfølgende opsamlingskop.



3. **Sæt** Toxcupen på dens fødder for at aktivere processen.




4. **Manipulationstest:** Efter et minut, sammenlignes farverne fra manipulationstesten med det vedlagte farve skema. **Aflæs ikke resultatet efter 2 minutter, da farverne kan ændre sig.**

Farve-skema



5. **Test for stoffer:** Aflæs resultatet når **Kontrol båndet (C)** fremkommer indenfor 5 minutter eller mindre. Resultatet **skal aflæses** inden 5 minutter. Aflæs resultatet som vist i instruktionen nedenfor.

Kontrolbånd

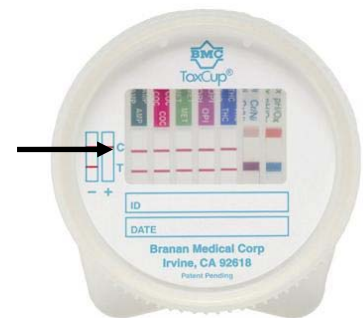

Aflæsning af ToxCup® Test Resultat

Negativt Resultat

For hver test skal der fremkomme 2 streger:

- En i **KONTROL(C)** området
- En i det **specifikke TEST** område

Tydeligheden af stregerne kan variere, men hvis de er synlige, er det et Negativt resultat.



Eksempel på aflæsning:

AMP: Negativ
 COC: Negativ
 MET: Negativ
 OPI: Negativ
 THC: Negativ

Antageligt Positivt Resultat

I **KONTROL(C)** området skal der være en farvet streg. Når der ikke fremkommer nogen streg i et specifikt testområde, er testen antageligt positiv for det pågældende stof.



Eksempel på aflæsning:

AMP: Negativ
 COC: **Positivt**
 MET: Negativ
 OPI: Negativ
 THC: **Positivt**

Ugyldigt Resultat

Ingen streg ud for **KONTROL(C)** området: testen **ugyldig**, selvom der er streger i testområdet. **Gentag** testen med en ny ToxCup®.



Eksempel på aflæsning:

AMP: **Ugyldig**
 COC: Negativ
 MET: Negativ
 OPI: **Ugyldig**
 THC: Negativ

Ordforklaring:

THC: Hash, **MET:** Methamfetamin, **AMP:** Amfetamin, **COC:** Kokain, **OPI:** Opiater, **PCP:** Phencyclidine